

Scrip Talk[®]



GUÍA DE INICIO RÁPIDO


STS2V3-RF

¡Felicidades por tu nueva Estación ScripTalk 2! Esta Guía de Inicio Rápido le ayudará en sus esfuerzos para facilitar la seguridad, privacidad e independencia a la hora de manejar sus recetas médicas.

¿Qué contiene el paquete?



Los botones

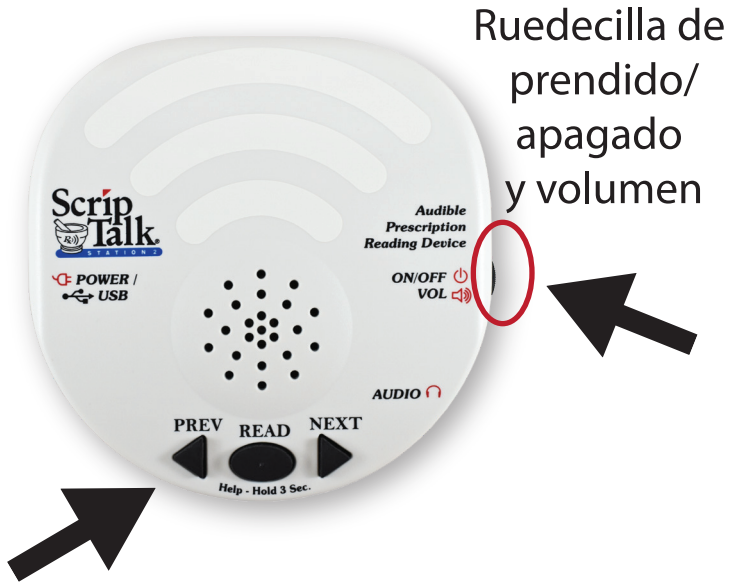

Ruedecilla de
prendido/
apagado
y volumen

El dispositivo cuenta con una ruedecilla de prendido/apagado y volumen y tres botones que le permitirán operar la lectora y acceder a la información en sus etiquetas de prescripción.

Información sobre la etiqueta electrónica

La etiqueta parlante puede ser encontrada en:



- la parte inferior de su frasco o contenedor
- un lado de su frasco o caja



Dependiendo del paquete o el contenido de su medicina, su etiqueta podrá estar incorporada como una etiqueta anexa.

Para acceder a la etiqueta electrónica, levántela y aléjela del paquete cuando la vaya a escanear.



Recargando la batería

Cuando la batería esté descargada, el dispositivo le dirá en voz alta **“Batería baja, cargar ahora.”**



Conecte el cable USB en el puerto a la izquierda de la lectora. Luego, enchufe el adaptador a una fuente de poder o corriente.

Cargar el dispositivo tomará entre 4 a 5 horas.

Control de poder y volumen

Gire la ruedecilla en sentido de las agujas de reloj para encender el dispositivo.



Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla.



Para apagar el dispositivo, gire la ruedecilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un 'clic'.



Ayuda incluida

Para escuchar las instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo, presione y mantenga presionado "READ" por alrededor de 3 segundos. Para interrumpir las instrucciones, presione "READ" nuevamente.

3
segundos



Presione "NEXT" o "PREV" para navegar por las distintas secciones de la información.



Escuchando las etiquetas

- Para escanear, presione el botón “READ”.
- Escuchará unos pitidos.
- Coloque su etiqueta sobre la lectora.
 - Escuche la información de su etiqueta.
 - Para interrumpir al dispositivo, presione “READ”.



Navegando por la información



Mientras la unidad dice en voz alta la información en la etiqueta, usted puede presionar “NEXT” o “PREV” para navegar por la información o para repetir una sección específica.

Resolución de problemas

Coloque sus recetas sobre la lectora individualmente. El dispositivo solo puede leer una etiqueta a la vez.

Si el dispositivo no puede encontrar o escanear la etiqueta, este le dará una advertencia.

Comuníquese con un amigo o familiar que pueda leer la etiqueta por usted, y consulte con su farmacéutico/a para obtener una etiqueta nueva.



¡Advertencia! No se puede leer la etiqueta



Cambiando la velocidad de la voz

Para cambiar la velocidad de la voz, presione y deje presionado “NEXT” o “PREV” por tres segundos, luego presione “NEXT” o “PREV” y ajuste la velocidad de acuerdo a su preferencia. Para terminar, presione “READ” para así establecer la velocidad deseada.



3 segundos

Seleccionar

Establecer

Modo de deletreo

Si no entiende una palabra específica, el dispositivo puede deletrear la información para usted. Seleccione la opción más lenta cuando ajuste la velocidad de la voz. Este dirá “Modo de deletreo”. Presione “READ” para establecer esa opción, luego escanee su etiqueta. Para salir de este modo, vuelva a cambiar la velocidad de la voz.



Accesorios

Para su comodidad, disponemos de un práctico bolso de viaje. Este cuenta con una cremallera y está diseñado para guardar su dispositivo y sus medicamentos. Además, es perfecto para viajes o para organizar sus medicamentos.



Bolso de viaje ScripTalk

\$24.99

Audifonos

\$15.99

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan dar lugar a una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: El cesionario no es responsable de ningún cambio o modificación no aprobado expresamente por el responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó, y se determinó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no puedan producirse interferencias perjudiciales en una instalación determinada. Si el equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o TV (para comprobarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo), se recomienda que pruebe las siguientes soluciones para resolver el problema:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que se encuentre conectado el receptor.
- Consulte a un distribuidor o a un técnico experimentado en radio y TV para obtener ayuda.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites aplicables a la exposición a energía de radiofrecuencia (RF). Este dispositivo no se debe usar ni colocar junto a otros transmisores o antenas.

Notas

Para más información o asistencia,
por favor contáctenos:

En-Vision America
825 4th St W
Palmetto, FL 34221

Número gratuito: (800) 890-1180

Fax (309) 452-3643

frontdesk@envisionamerica.com

www.envisionamerica.com



**En-Vision
AMERICA[®]**

STS2V3-RF